

あなたのワンちゃんは今日も元気ですか？

わんわん チェッカー



愛犬用郵送検診キット
特許出願中

New!



¥4,900 (税込)

- 🐾 小型犬から大型犬までどんな犬種でも検査できます
- 🐾 自宅で採取して検査センターに送るだけ！
動物病院に行く必要がありません
病院が嫌いなワンちゃんにもおすすめです
郵送してから約一週間で結果が届きます
- 🐾 使い方は簡単！痛がることもありません

検査結果送付時に
イヌの病気の参考資料
同封します！

尿の採取方法
排尿を紙コップに採り、スポイトで吸い上げ尿容器に移しフタを閉めます

左記の方法で採取できない場合は、排尿時、カット綿に尿をしみこませ、カット綿を尿容器の中に割りばしなどで入れます。

便の採取方法
便容器のフタ部分についているスプーンで便を少量とり、再び容器にもどしフタを閉めます。

検査項目	
尿検査	基準値範囲外の場合に疑われる主な原因・状態
検査項目	糖
	糖尿病の疑い、ストレス、糖分の過剰摂取
	蛋白
	腎臓疾患、疲労、摂取物による影響
	潜血
	腎臓・尿路疾患、疲労
	P H
	腎臓機能低下、腎臓・尿路疾患
	比重
	腎臓機能低下、腎臓疾患
便検査	
検査項目	検出可能な寄生虫
寄生虫検査	回虫(カイチュウ)、鉤虫(コウチュウ)
	鞭虫(ベンチュウ)、糸虫(ジョウチュウ)



インターネット・携帯電話でもご注文いただけます
<http://www.exlam.com/dog/>

株式会社 エクラム

〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-34-17
コスモスパジオ403
TEL/FAX 03-3307-1891

わんわんチェッカー 申込書

お申込み方法 申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みください。 FAX **03-3307-1891**

フリガナ		〒	
お名前		ご住所	
T E L	()		
F A X	()	e-mail	

あなたのワンちゃんは今日も元気ですか？
わんわんチェッカー



を 個申し込みます

お方支払法
 代金引換 (送料¥525) 代引手数料¥315
 銀行振込 (送料¥525) 振込手数料お客様負担